


MIA in Ihrer Einrichtung

Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre MIA Ausstattung!

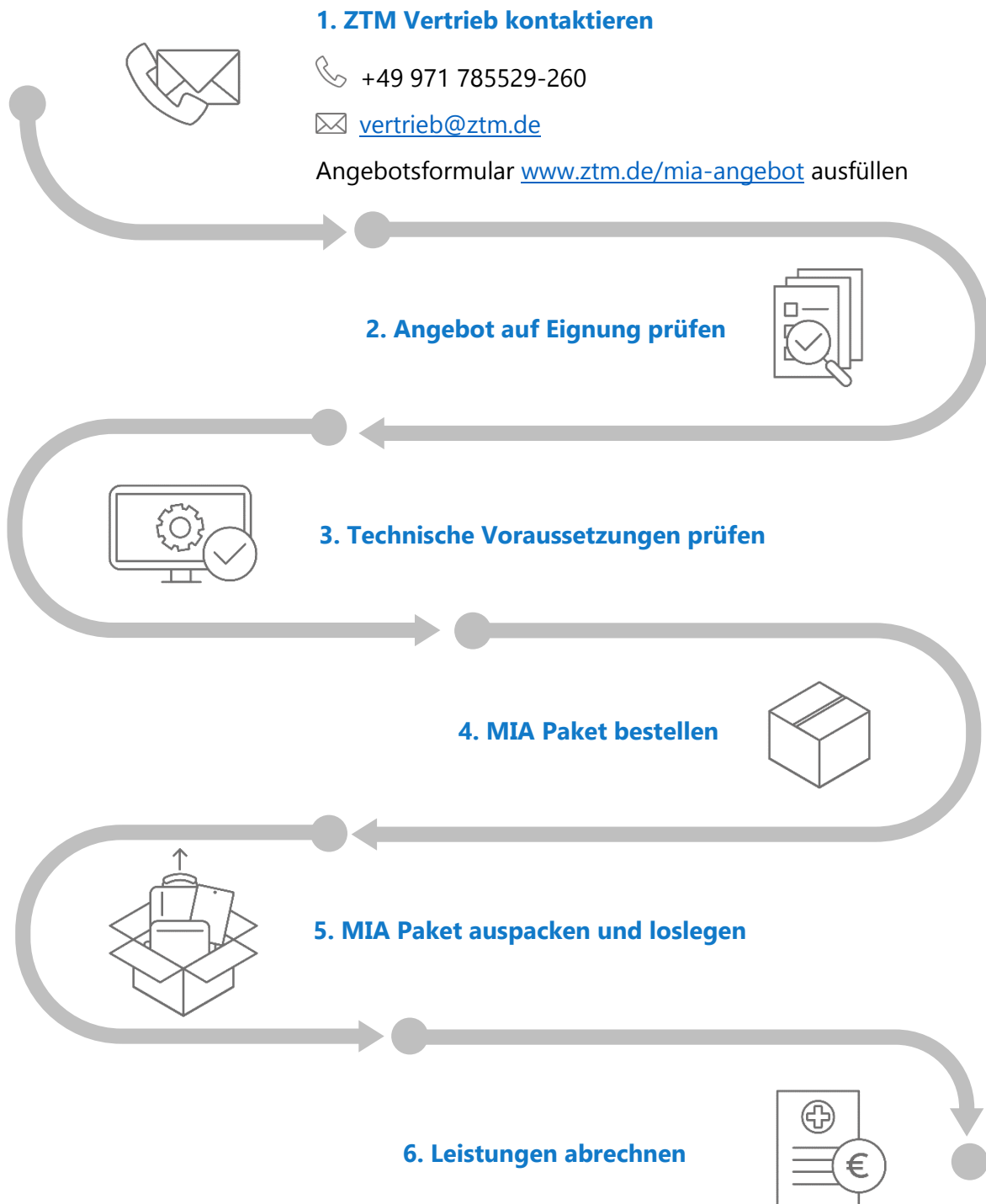

Sie sind sich bei den Voraussetzungen nicht sicher?
Wir prüfen diese gerne gemeinsam mit Ihnen!

 +49 971 785529-260

 vertrieb@ztm.de

Voraussetzungen

Prüfen Sie vorab die technischen Gegebenheiten in Ihrer Einrichtung!



Internetfähiger PC

MIA läuft unabhängig des Betriebssystems auf dem PC. Der PC muss eine stabile Internetverbindung entweder per LAN-Kabel oder WLAN besitzen.




Webbrowser

Folgende Browser gewährleisten eine fehlerfreie Darstellung der Anwendung: Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge (ab Version 79), Internet Explorer (ab Version 10).



Webcam

Für die Übertragung von Bild und Video während der MIA Videotelefonie muss am PC eine Webcam angeschlossen sein.

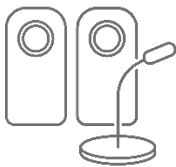

Lautsprecher & Tischmikrofon

Für die Übertragung von Ton während der MIA Videotelefonie müssen am PC ein Lautsprecher und ein Tischmikrofon angeschlossen sein. Alternativ kann auch ein Headset angeschlossen werden.



Headset

Alternativ zu Lautsprecher und Tischmikrofon für die Übertragung von Ton während der MIA Videotelefonie kann ein kabelgebundenes bzw. kabelloses Headset am PC angeschlossen werden.



MIA Daten-Schnittstelle

Damit MIA Datensätze direkt von Ihrem Primärsystem (z.B. PVS) empfangen werden, muss das Primärsystem der medizinischen Einrichtung eine vollumfängliche GDT-Schnittstelle ab Version 2.1 (mit verfügbarer Feldkennung 6303 bis 6305) besitzen.

Sie sind sich bei den Voraussetzungen nicht sicher?


Wir prüfen diese gerne gemeinsam mit Ihnen!

+49 971 785529-260

vertrieb@ztm.de

Schnellstartanleitung


Einfach mit MIA durchstarten!

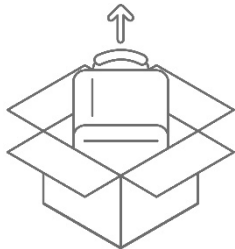


1. Paket öffnen und Rucksack entpacken




2. Tablet aus Rucksack entnehmen

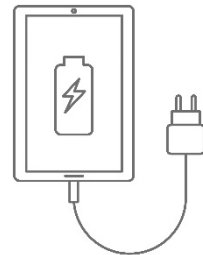


3. Tablet aufladen (mindestens 50 %)

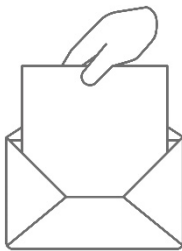


4. Zugangsdaten bereitlegen

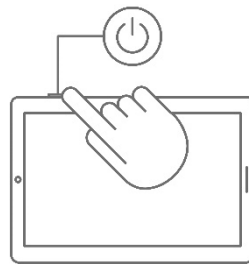


5. Tablet einschalten

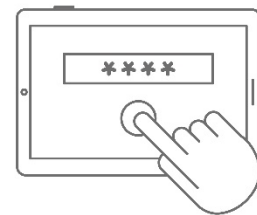


6. Sperrbildschirm-Pin eingeben

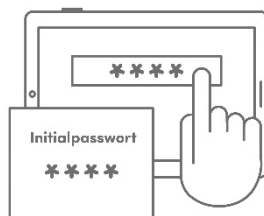

7. Initialpasswort eingeben

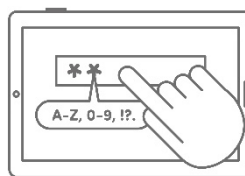

8. Passwort abändern

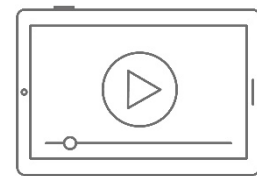

9. Lernvideos anschauen

Sie haben Fragen oder technische Probleme?
Unser IT-Service hilft Ihnen gerne weiter!

 0800 4321 112

 service@ztm.de


MIA Arztportal

So empfangen Sie die Messungen
(ohne Daten-Schnittstelle ins PVS)




1. In das MIA Arztportal einloggen

- Öffnen Sie einen unterstützten Webbrowser
- Öffnen Sie die Login-Seite <https://mia.curafida.de>
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein
- Klicken Sie auf „Anmelden“

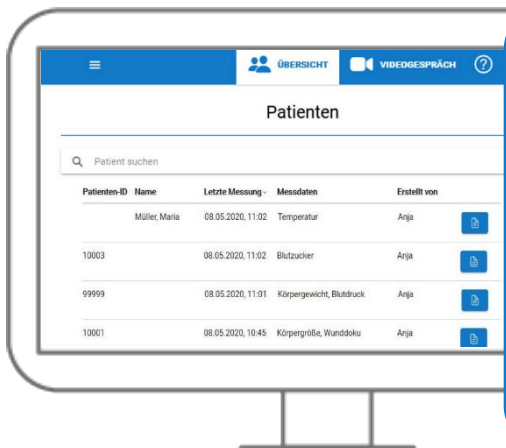

2. Patienten-Messung einsehen

- Geben Sie den Patientennamen in die Suchleiste ein oder
- Klicken Sie auf die Zeile in der Patientenliste mit dem gesuchten Patienten
- Lesen Sie die Messung in der geöffneten Patientenakte ab

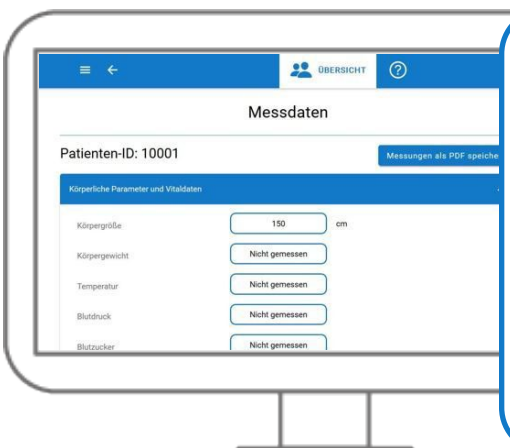

3. Patienten-Messung als PDF exportieren

- Wählen Sie wie in Schritt 2 beschrieben einen Patienten aus
- Klicken Sie auf „Messungen als PDF speichern“
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Portal, um das PDF in Ihrem PVS zu hinterlegen

Sie haben Fragen zu Funktionen und der Anwendung?
Besuchen Sie das MIA Handbuch unter mia-handbuch.ztm.de